

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Klausos aparato JE7 VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdų nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA


Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

1. Klausos aparato JE7 dalys



2. Klausos aparato valdymas

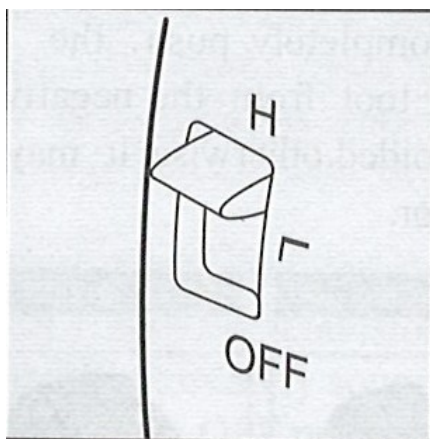


H pozicija - Nustatytas aukštas tonas (išryškina aukšto dažnio garsus).

L pozicija - Nustatytas žemas tonas (išryškina žemo dažnio garsus).

OFF pozicija - Klausos aparato išjungimas

2.1. Garso didinimas

Klausos aparato garsą didinkite, kaip nurodyta paveikslėlyje žemiau. Sukdami reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę didinkite garsą. Sukdami reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę mažinkite garsą.

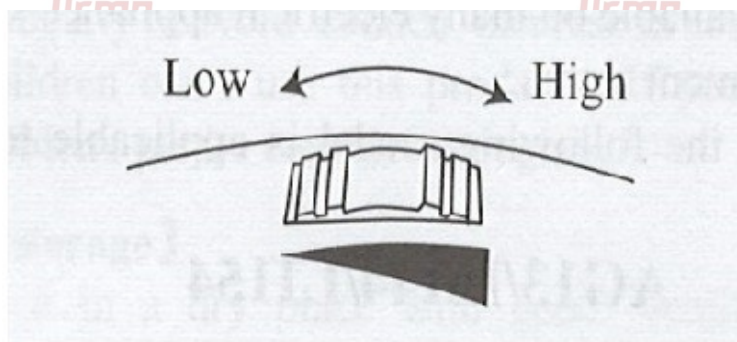

3. Klausos aparato JE7 naudojimas ir pajungimas

1. Įdėkite bateriją į baterijos lizdą, uždarykite jį, tuomet klausos aparatas įsijungs.
2. Pirmą kartą dedami klausos aparatą į ausies landą, įsitikinkite, kad garso lygis nustatytas vidutinis ar silpnas.
3. Švelniai įsidėkite garso imtuvą su silikoniniu antgaliu, taip, kad Jums būtų patogiu.
4. Jeigu silpnai girdite, patikrinkite ar klausos aparato antgalis gerai uždėtas, ar tinkamai prigludęs, padidinkite garso lygį.
5. Atidarius baterijos lizdą aparatas išsijungia.

4. Klausos aparato priežiūra ir valymas

1. Tinkama ir tvarkinga ausų priežiūra mažina klausos aparato valymo dažnumą, bei tausoja patį klausos aparatą.
2. Klausos aparatą valykite su sausu audeklu, specialiu šepetėliu.
3. Naudokite specialų valymo skystį.
4. Klausos aparatą saugoti nuo drėgmės.
5. Neišmeskite baterijų į buitinių atliekų konteinerį, jas meskite į specializuotus konteinerius.
6. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

DUK

- Nėra garso, arba garsas yra per silpnas.
- Patikrinkite ar baterija teisingai įdėta ir nėra išsikrovusi. Jei baterija išsikrovusi, ją pakeiskite. Patikrinkite ar klausos aparatas nėra užsikimšęs – reikėtų jį išvalyti.
- Klausos aparatas skleidžia garsus panašius į „cypimą“.
- Patikrinkite:
 - Ar silikoninė galvutė yra Jums tinkamo dydžio.
 - Ar klausos aparato antgalis yra tinkamai prigludęs ausies landoje.
 - Ar klausos aparatas yra tinkamai įdėtas.
 - Ar neįtrūkusi garso perdavimo šlangutė.

SVARBU: Garso panašaus į „cypimą“ pagrindinė priežastis – susidarantis oro tarpas tarp klausos aparato antgalio ir ausies landos. Patikrinkite ar visi nurodymai, nurodyti aukščiau yra atlikti.