

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Aurica klausos aparatų

VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

**AURICA**
Let's hear together!

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.


Naudojimo, saugumo patarimai

- Nusiimkite, nenaudokite klausos aparatų, kuomet esate mediciniškai tikrinamas (tikrinant rentgeno spinduliais ar k.t.).
- Laikykite klausos aparato baterijas atskirai nuo kitų baterijų, medicininių preparatų, tablečių ir k.t. smulkių daiktų, kurie gali vizualiai atrodyti panašiai.
- Klausos aparatas, jo dalys, baterijos turi būti saugomi vaikams, gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Prariję klausos aparato baterija, skubiai kreipkitės į medicinos punktą.

Baterijos keitimas



Klausos aparatui naudokite specialias klausos aparato baterijas!

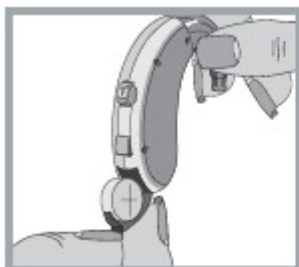

Naudodami netinkamas baterijas (laikrodžio ar k.t.) gali sugadinti klausos aparatą. Tokiu atveju, garantija klausos aparatui negalioja.

1. Lengvai pastumkite baterijos stalčių su piršto nagu, pilnai atidarykite stalčių.
2. Paimkite klausos aparato bateriją, nuimkite apsauginę plėvelę, esančia ant galinės klausos aparato dalies, palaukite 1 minutę, kol baterija pradės sąveikauti su deguonimi.
3. Įdėkite bateriją taip, kad baterijos priekinėje pusėje esantis (+) simbolis būtų toje pačioje pusėje, kaip klausos aparato stalčiaus krašte esantis (+) simbolis.



Bateriją privaloma dėti tik į jai skirtą stalčių.

Pastebėjimas: Jeigu baterija bus įdėta priešinga puse, stalčius neužsidarys.





Jeigu klausos aparato galingumas ar garsumas yra sumažėjęs, klausos aparatas atsijungia tai indikuoja, jog reikalingas baterijos keitimas.

Garso reguliavimas

Atkreipkite dėmesio, kad įsigijus klausos aparatą, klausa reikalauja laiko, kol adaptuojasi prie naujų garsų, bei jų stiprumo, intensyvumo. Kiek laiko prireiks, kad klausa adaptuotus prie klausos aparato, priklauso nuo kiekvieno vartotojo klausos sutrikimų, naudojimo laiko ir k.t. Jeigu jaučiate diskomfortą naudodami klausos aparatą, pamažinkite klausos aparato garsumą, arba išjunkite ir pailsėkite.

Kuomet žiūrite televizorių, nustatykite garsumą ant vidutinio stiprumo. Jeigu sunkiai suprantate žodžius, padidinkite klausos aparato garsumą naudodami garsumo reguliavimą. Atkreipkite dėmesį, kad didesnis garsumas gali sumažinti žodžių raiškumą ir išprovokuoti klausos nuovargį.

Garsumas reguliuojamas keliais būdais, priklausomai nuo jūsų klausos aparato. Spauskite (+) norėdami padidinti garsumą, spauskite (-) norėdami sumažinti garsumą. Jeigu jūsų klausos aparatas turi rutulinį garso reguliavimą, kuomet didesnę skaičių pasirinksite – tuo didesnis klausos aparato garsumas.

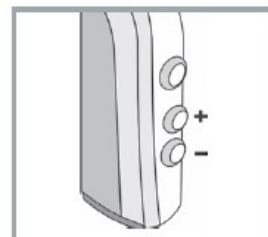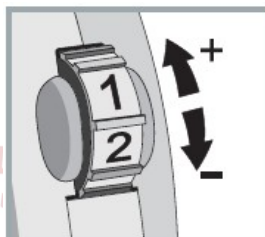

Ijungimas / išjungimas

Klausos aparatas yra įjungiamas, bei išjungiamas pasitelkiant klausos aparato baterijos stalčių:

Norėdami **įjungti** klausos aparatą, įdėję bateriją, pilnai uždarykite klausos aparato baterijų stalčių.

Norėdami **išjungti** klausos aparatą, lengvai atidarykite klausos aparato baterijų stalčių, kol išgirsite spragtelėjimą.



Neturite pradaryti klausos aparato baterijų stalčiaus pilnai, kad išjungti klausos aparatą. Klausos aparatai turi tris stalčiaus pozicijas.

Klausos aparato įdėjimas į ausį / išėmimas iš ausies





Prieš įdėdami klausos aparatą į ausį, įsitikinkite, kad į klausos aparatą yra įdėta baterija, taip pat klausos aparatas yra išjungtas (klausos aparato baterijos stalčius yra šiek tiek pravertas).

Kad įdėti klausos aparatą į ausį, laikykite klausos aparato dinamiką pasukę į išorinę pusę su nykščiu, bei rodomuoju pirštu.

Pasukite klausos aparato dinamiką į ausies pusę, įsidėkite dinamiką su antgaliu į ausį.

Pakelkite klausos aparato korpusą, perdėkite jį per ausį, kad jis tvirtai ir patogiai laikytųsi virš ausies.

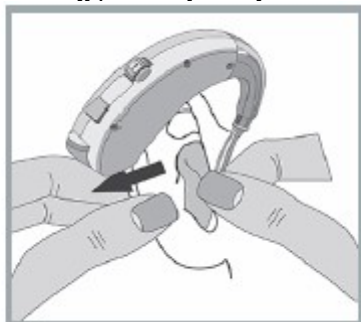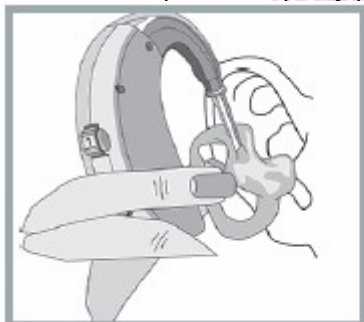

Problemų sprendimas

Klausos aparatas neveikia:

- Įsitikinkite, kad baterija yra įdėta tinkama puse, į klausos aparato baterijos stalčių.
- Įsitikinkite, kad klausos aparato baterijos stalčius yra pilnai uždarytas.
- Įsitikinkite, kad baterija nėra išsėdusi.
- Įsitikinkite, kad klausos aparato oro šlangutė, silikoninis antgalis nėra užsikimšęs.

Klausos aparato skleidžiamas garsas yra per tylus, girdimas užimas:

- Patikrinkite garso reguliavimą, ar klausos aparatas nėra nutildytas.
- Įsitikinkite, kad baterija nėra išsėdusi.
- Įsitikinkite, kad klausos aparato oro šlangutė, silikoninis antgalis nėra užsikimšęs.
- Patikrinkite, ar klausos aparatas nėra sudrėkęs, sušlapęs. Naudokite specialius džiovintuvus klausos aparatams.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Klausos aparatas cypia:

- Klausos aparatas nėra pilnai įdėtas į ausies landą (atsiradęs oro tarpas), išimkite klausos aparatą, įdėkite iš naujo.
- Įsitikinkite, ar klausos aparato oro šlangutė nėra įtrūkusi. Jeigu reikalingas šlangutės keitimas – kreipkitės į specialistus.
- Silikoninis antgalis gali būti deformuotas, reikalingas keitimas nauju.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt