

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Deguonies koncentratoriaus VARTOTOJO VADOVAS



BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.


NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.


ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.

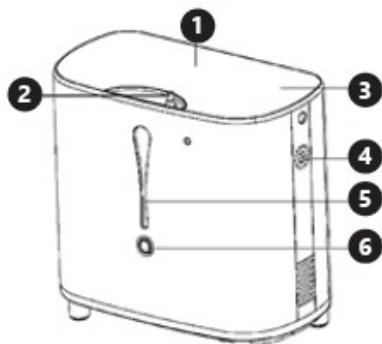

- 1) Ekranas
- 2) Oro išleidimo anga
- 3) Meniu
- 4) Garsiakalbis
- 5) Vandens talpa
- 6) Talpos mygtukas
- 7) Maitinimo kištukas
- 8) Maitinimo mygtukas
- 9) Filtras
- 10) Ventiliavimo angos
- 11) Saugiklio rankena

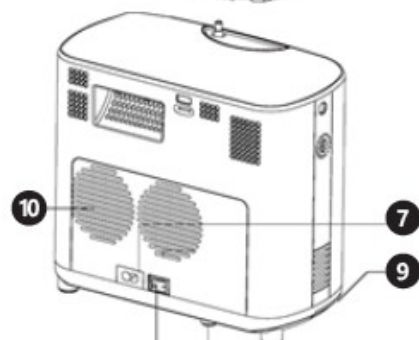


- 12) Neigiamų jonų generavimas (funkcija negalima)
- 13) Garsumas "+/-"
- 14) Laiko sumažinimo mygtukas
- 15) Laiko padidinimo mygtukas
- 16) Srauto sumažinimo mygtukas
- 17) Srauto padidinimo mygtukas
- 18) „JUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtukas
- 19) „SOS“ mygtukas

Paruošimas naudojimui

Aplinkos temperatūra turėtų būti nuo 10 ° C iki 40 ° C, o santykinė oro drėgmė neturi viršyti 75%. Užtikrinkite gerą ventiliaciją patalpoje, kurioje įrenginys yra naudojamas. Turi būti bent 10 cm atstumas tarp kiekvienos prietaiso pusės ir sienos ar kitų objektų. Laikykite įrenginį atokiau nuo karštų paviršių. Prietaisas turėtų būti naudojamas ant lygaus, stabilaus, švaraus, bei ugniai atsparaus, sauso paviršiaus. Įrenginys turėtų būti nepasiekiamas vaikams. Padėkite prietaisą taip, kad bet kada turėtumėte prieigą prie maitinimo kištuko. Maitinimo laidas, prijungtas prie įrenginio turėtų būti tinkamai įžemintas ir atitikti technines gaminio etiketę. Nepalikite prietaiso vietose, kuriose įrenginį gali pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai. ĮSPĖJIMAS! Jei transportavimo ar laikymo temperatūra yra žemesnė nei 8 ° C, prietaisą reikia palikti kambaryje, kurio temperatūra 10-40 ° C, bent keturiom valandom, prieš įjungiant.

Prieš pirmą naudojimą, nukirpkite užtrauktukus ant prietaiso pagrindo (kaip pažymėta paveikslėlyje žemiau).

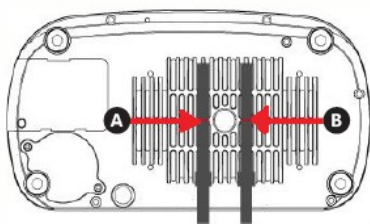

Prietaiso naudojimas

PASTABA: Šis deguonies aparatas yra skirtas asmeniniam naudojimui; tai nėra medicininės paskirties produktas.

Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą, patikrinkite ar prietaisas nėra pažeistas.

1. Paspauskite mygtuką [6] ir ištraukite vandens talpą [5]. Traukdami atidarykite talpos užpildą iš silikono kamščio. Užpildykite baką šaltu distiliuoto vandens arba šalto švaraus vandens.

ĮSPĖJIMAS! Neviršykite maksimalaus vandens lygio.

2. Uždarykite talpą su dangteliu ir įdėkite atgal į vietą. Įdėję talpyklą išgirsite „spragtelėjimą“.
3. Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio.
4. Įjunkite maitinimo jungiklį [8]. Užsidegs raudona lemputė. Prietaisas bus budėjimo režime.
5. Spustelėkite „JUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtuką [18], įsijungs ekranas.
6. Pasirinkite tinkamus parametrus:

a) ORO SRAUTO LYGIS SU PADIDĖJUSIA RŪGŠTIMI

- Kad pasirinkti oro srauto lygį, naudokite mygtukus [16] ir [17].

Lygis	Deguonies srautas ir koncentracijos vertė
Lygis 6	6 L, 28%
Lygis 5	5 L, 30%
Lygis 4	4 L, 32%
Lygis 3	3 L, 40%
Lygis 2	2 L, 60%
Lygis 1	1 L, 90%

- Prijunkite oro išleidimo angą [2].

b) LAIKO NUSTATYMAS

- Naudokite [14] ir [15] mygtukus, kad nustatyti automatinį maksimalų deguonies srauto laiką. Maksimalus laikas gali būti nustatytas iki 3-ių valandų.
- Paspaudus mygtuką [15], laikas prasitęsia 15-a minučių. Įspaudus ir palaikius mygtuką [15] laikas didinamas, kol laikomas įspaustas mygtukas.
- Paspaudus mygtuką [14], laikas sumažėja 15 minučių. Įspaudus ir palaikius mygtuką [14] laikas mažinamas, kol laikomas įspaustas mygtukas.
- Kuomet nustatytas laikas pasibaigia, ekrane bus rodomas laikas „00:00“, deguonies srautas sustos. Kad atstatyti laiką, spauskite mygtuką [15].
- Jeigu laikas nebus nustatytas, ekrane bus rodoma „- H - M“, kuris indikuos, jog automatinis laiko nustatymas nėra aktyvuotas. Įrenginys veiks nepertraukiamu režimu, kol jis nebus išjungtas.

7. Įrenginio išjungimas

- Norėdami sustabdyti įrenginį, spustelėkite „JUNGTI / IŠJUNGTI“ mygtuką [18].
- Kad išjungti įrenginį, įspauskite ir palaikykite „JUNGTI / IŠJUNGTI“ mygtuką [18]. Atjunkite oro išleidimo angą, po naudojimo. Nugarinėje prietaiso pusėje, išjunkite maitinimo mygtuką [8], tuomet pašalinkite maitinimo kištuką.

Valymas ir priežiūra

- a) Atjunkite maitinimo laidą, bei leiskite prietaisui pilnai atvėsti, prieš pradėdami valymą, reguliavimą, dalių montavimą, arba jeigu įrenginys nebus naudojamas.
- b) Naudokite tik valiklius, skirtus nerūdijančiam paviršiui.
- c) Po įrenginio valymo, visos dalys turėtų būti išdžiovintos prieš sekantį naudojimą.
- d) Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių.
- e) Nepurškite įrenginio su vandeniu, nenardinkite įrenginio į vandenį.
- f) Neleiskite vandeniui patekti į prietaiso vidinę dalį pro jokias angas.
- g) Valykite angas tik su šepetėliu ir suspaustu oru.
- h) Įrenginys turėtų būti reguliariai tikrinamas, kad įsitikinti, jog nėra pažeidimų.
- i) Naudokite minkštą, drėgną šluostę valymui.

- j) Nenaudokite aštrių ir/arba metalinių daiktų valymui.
- k) Valykite vandens talpą kartą per savaitę.
- l) Nepalikite vandens talpoje vandens, jeigu įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laiką.

Filtrai

- a) Prieš pašalindami filtrą, ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite prietaisui pilnai atvėsti.
- b) Išvalykite filtrą su švelniu plovikliu, tuomet išskalaukite su švariu vandeniu.
- c) Prieš įdėdami filtrą, pilnai išdžiovinkite prietaisą.
- d) Valykite filtrą kas 15 dienų.
- e) Tikrinkite filtro būklę (purvas gali būti matomas per groteles) ir pakeiskite, jeigu būtina.

Filtro vieta:

